



## MUCOGYNE

### Presentación

8 unidades de 5 ml con aplicador

Producto sanitario.


Gel íntimo no hormonal a base de ácido hialurónico con estructura liposomal, formulado para restaurar la mucosa vulvovaginal en todas las mujeres, independientemente de su edad.

### Utilización

Mucogyne permite mantener la elasticidad, la lubricación y la hidratación natural de la mucosa vulvovaginal y paliar las deficiencias de las secreciones naturales.

### Modo de empleo

Se utiliza por vía vaginal cada unidad o aplicándola sobre la zona íntima externa.

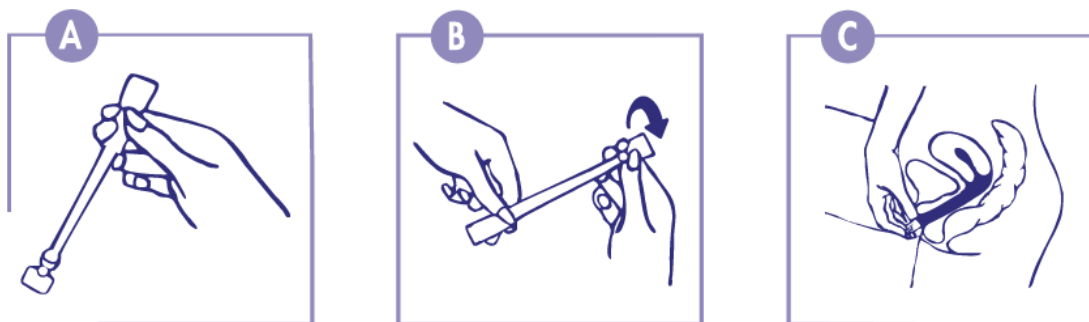

1. Presione el contenido del aplicador en la dirección de la punta.
2. Rompa el sello del tapón protector girándolo, para quitarlo y desecharlo.
3. Coja el aplicador entre el dedo pulgar y el índice por la parte del depósito que contiene el gel. Introduzca delicadamente por la punta de la monodosis en la vagina (la parte del depósito debe quedar en el exterior de la vagina).

Apriete firmemente de un golpe seco para descargar la dosis completa de gel en la vagina. Saque el aplicador de la vagina y deséchelo.



## Beneficios de Mucogyne

Respeto el pH fisiológico de la zona íntima.

Su textura no grasa, que no gotea ni mancha, ofrece una mayor comodidad de uso.

## Precauciones de empleo

No utilice el producto en caso de alergia conocida a alguno de los componentes.

Hable con su médico o su matrona antes de usar Mucogyne durante el embarazo.

Compatible con los preservativos. Mucogyne se puede combinar con cualquier tratamiento hormonal. Mucogyne no es un anticonceptivo. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar después de la fecha de caducidad que se indica en el envase individual. Conservar a una temperatura de entre 5 °C y 30 °C.

## Ingredientes

Agua, propilenglicol, glicerina, lecitina hidrogenada, carbomer, etilhexil-glicerina, hidróxido de sodio, hexamidina diisetionato, hialuronato de sodio, DL-acetato de tocoferilo, extracto de flor de malva sylvestris, extracto de flor de manzanilla alemana, tocoferol. Principio activo: ácido hialurónico

**Fabricante:** Laboratoires IPRAD PHARMA – 22 Rue des Aqueducs - 94250, Gentilly - FRANCE

**Distribuidor:** BOIRON S.I.H., s.a. C/ Lanzarote, 2 - 28703 San Sebastián de los Reyes- MADRID

CN: 184419.4

Fecha de revisión del texto: 05/2024